

Instrucciones para la Recolección de Hisopos

PRECISION DIAGNOSTICS LABORATORY



Children's Hospital Colorado
Here, it's different.™

INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE HISOPOS



**ANTES DE COMENZAR LA
RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA,
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
PARA ASEGURARSE DE QUE
COMPRENDE EL PROCESO.
ESTO ASEGURARÁ UNA
COLECCIÓN EXACTA.**

Vea el vídeo para aprender a recoger sus muestras.



Escanee el código QR o visite:
youtube.com/watch?v=v52ae3cpeyU



Abra la cámara del iPhone o el lector de códigos QR.



Pase el ratón sobre el código para analizarlo.



Haga clic en el mensaje para visitar el sitio web del vídeo.



IMPORTANTE


NO coma ni beba durante los 30 minutos anteriores a la recolección de las muestras.

- Esto incluye chicle, tabaco para mascar, fumar, mentas, pastillas u otros dulces duros.


NO se cepille los dientes antes de la recolección.



INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCIÓN DEL HISOPO

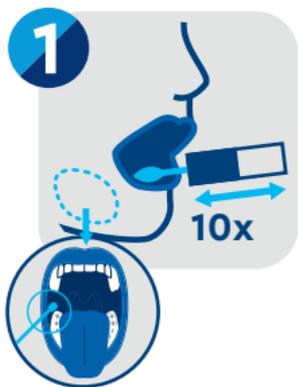

Retire el hisopo sin tocar la punta de la esponja. Coloque la esponja en el lado superior izquierdo de la boca (en el interior de la mejilla izquierda) en el espacio donde las encías superiores se unen con la mejilla. Raspe a lo largo de esta área en un movimiento hacia adelante y hacia atrás por lo menos 10 veces. **No frote los dientes.**

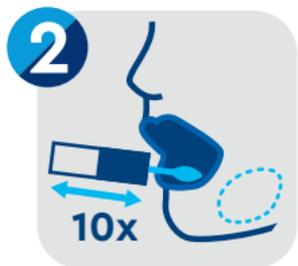

Repita el movimiento de raspado en el centro y en la parte inferior de la mejilla izquierda. **No frote los dientes.**



Mantenga el tubo en posición vertical para evitar que se derrame líquido dentro del tubo. Turn the cap upside down.

4



Sítúe el tapaboca abajo. Coloque la esponja en el tubo y cierre bien la tapa.

5



Dé la vuelta al tubo tapado y agítelo rápidamente 10 veces.

6

Repita los pasos 1-5 y 4 con el segundo hisopo en la mejilla derecha.

7

Etiquete los hisopos con las etiquetas proporcionadas.

Asegúrese de incluir:

- Fecha/ horario en que se recolectaron las muestras
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Si se trata de una muestra de un miembro de la familia, debe incluir la relación con el paciente (madre, padre, hermano).
- **Todos los tubos deben estar etiquetados.**

Paquete de devolución del equipo

1



Después de recolectar la muestra, coloque los dos hisopos etiquetados en la bolsa para riesgo biológico suministrada y selle la bolsa. Coloque el formulario cumplimentado en el manguito frontal de la bolsa para residuos biológicos peligrosos.

2



Enrolle la bolsa de riesgo biológico con el formulario y las muestras dentro como un burrito. Esta es la mejor manera de colocar más de una muestra en una caja de retorno.

3



Coloque la(s) bolsa(s) para residuos biológicos peligrosos dentro de la caja de muestras. **ALTO:** Asegúrese de que todas las muestras estén etiquetadas con el nombre, la fecha y la hora, y que el formulario esté cumplimentado.

4



Coloque la caja de muestras dentro del FedEx UN3373 Clinical Pak.

Sitios para la devolución de paquetes

Devolución por FedEx *(sin cargo)*

- Deje el paquete en una oficina local de FedEx o en un buzón
- Llame al servicio de atención al cliente de FedEx al 1-800-463-3339 y diga "ground return pickup" para programar una recogida.

Devolución a una ubicación de laboratorio de pacientes ambulatorios de CHCO

ANSCHUTZ MEDICAL CAMPUS, AURORA

13123 East 16th Avenue, Aurora, CO 80045

- De lunes a viernes: 7 a.m. to 5:30 p.m.
- Sábados: 8 a.m. - 12 p.m.
- Sábados y domingos: Cerrado

CHILDREN'S COLORADO HEALTH PAVILION

860 North Potomac Circle, Aurora, CO 80011

- De lunes a viernes: 9:30 a.m. - 5:30 p.m.
- Sábados y domingos: Cerrado

SOUTH CAMPUS, HIGHLANDS RANCH

1811 Plaza Drive, Highlands Ranch, CO 80129

- De lunes a viernes: 7 a.m. - 5:30 p.m.
- Sábados y domingos: Cerrado

NORTH CAMPUS, BROOMFIELD

469 State Highway 7 Broomfield, CO 80023

- De lunes a viernes: 7 a.m. - 5:30 p.m.
- Sábados y domingos: Cerrado

OUTPATIENT CARE AT BRIARGATE

4125 Briargate Parkway, Colorado Springs, CO 80920

- De lunes a viernes: 8 a.m. - 5 p.m.
- Sábados y domingos: Cerrado

¿Preguntas?



Comuníquese con Servicios al cliente de laboratorio
al 720-777-6711



Children's Hospital Colorado

PDL 114 Buccal Swab Kit Ordering, Assembly Shipping and Receiving

ATT 2 Swab Collection Instructions

© Children's Hospital Colorado 2022 All rights reserved. Children's Hospital Colorado complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. • ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-720-777-1234. • CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-720-777-1234. QPS-974003G-2022-01